


ACROBAT™ Stabilizer シリーズ

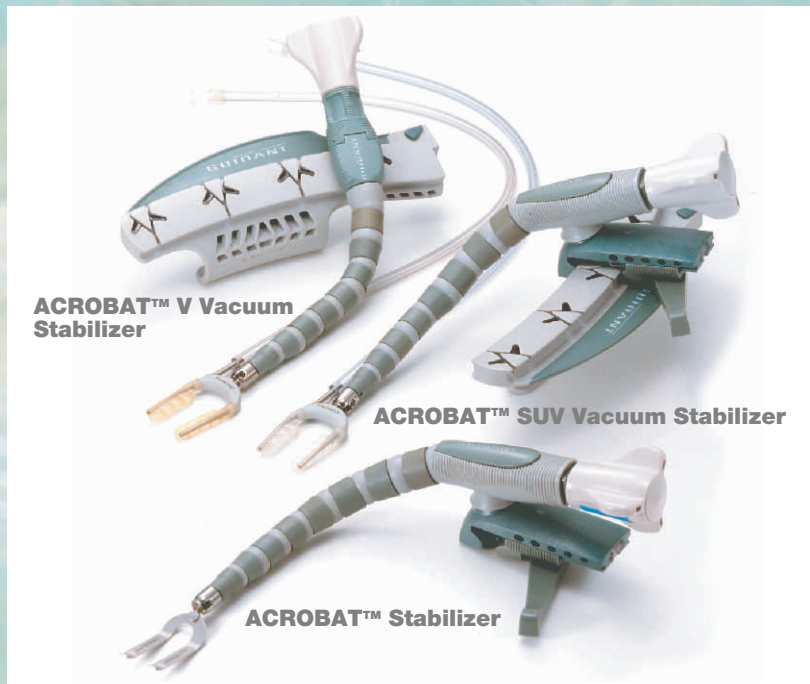

ACROBAT™ Stabilizer シリーズ

ACROBAT™ Stabilizer シリーズは
MAQUET社の最適なstabilizationを実現したデバイスです。

Can strength be flexible?

ACROBAT™ Vacuum StabilizerはOff-pumpバイパス手術中に拍動下にて術部の血管を剥離し、局部的に固定するように設計されているサクション(吸引)機能付きのスタビライザーです。

ACROBAT™ Vacuum Stabilizerは**Access Rail™**プラットフォーム(ブレード)とセットになっています。

Access Rail™プラットフォーム(ブレード)は**ACTIVATOR™ Drive**に取り付けて使用します。これらの併用により、胸骨切開中に胸腔へ容易にアクセスが可能となり、術部も直接確認できるようになります。さらには各スタビライザー先端にはフットが付いており縫合部位をしっかり固定し心膜縫合を容易に行うことができます。

ACROBAT™ Vacuum Stabilizerには**ACROBAT™ V Vacuum Stabilizer**と**ACROBAT™ SUV Vacuum Stabilizer**があります。**ACROBAT™ SUV Vacuum Stabilizer**はユニバーサルタイプのマウントを採用しています。

ACROBAT™ Stabilizerはサクション(吸引)機能がないメカニカル・スタビライザーです。

MAQUET

INNOVATION




Importing and sales of medical devices

VITAL

www.vital-j.co.jp

ACROBAT™ Stabilizerシリーズ

ハートエクスポージャー オフポンプシステム

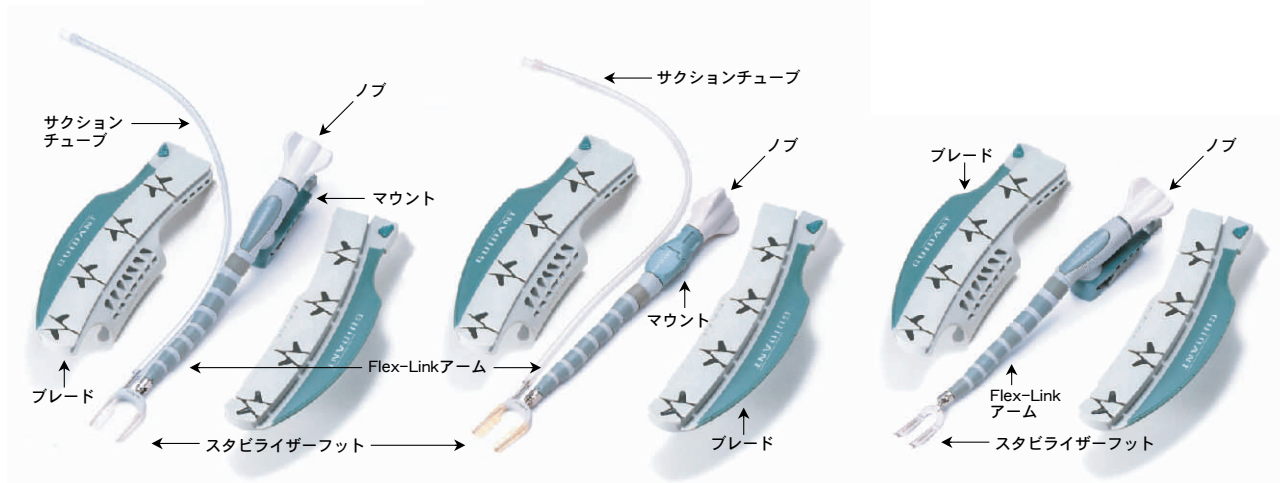ACROBAT™ SUV Vacuum Stabilizer
with Standard BladesACROBAT™ V Vacuum Stabilizer
with Standard BladesACROBAT™ Stabilizer
with Standard Blades

ACROBAT™ Stabilizer

モデルナンバー	製品名
OM-6000S	ACROBAT Stabilizer with Standard Blades

ACROBAT™ Vacuum Stabilizer

モデルナンバー	製品名
OM-9000S	ACROBAT SUV Vacuum Stabilizer with Standard Blades
OM-9100S	ACROBAT V Vacuum Stabilizer with Standard Blades

【警告・注意】

- ・本製品を使用する場合には、事前にMAQUET社製品を使用した心臓外科手術に関する十分なトレーニングを必ず受けてください。
- ・患者の解剖学的な構造、病理学、手術テクニックなど多くの因子から、治療結果に影響を与える可能性があります。適応患者と治療方法には医師が責任を持って選択を行ってください。
- ・本装置は必ずMAQUET社製スタビライザー製品と併用して使用してください。
- ・他の手術用リトラクターと併用して使用する場合には、術部へのアクセスや術部の確認に必要とされる最低限の開創に留めるように努めてください。
- ・スタビライザーを開創器にマウント配置する際にはマウント部分やマウントレバーが患者組織に接触しないように注意してください。
- ・スタビライザーを心外膜から取り外す際に、縫合部を引き裂かないように細心の注意を払ってください。
- ・心臓の縫合糸が Access Rail™ プラットフォーム(ブレード)につながっている場合にはプラットフォームを操作しないよう細心の注意を払ってください。
- ・縫合糸ホルダーはサイズ"0"の縫合糸用に設計されています。

- ・ACTIVATOR™ Drive Mechanismは滅菌されていませんので、使用前に必ず洗浄および滅菌を行ってください。手術用器具の洗浄を行う場合には生理食塩水を絶対に使用しないでください。

- ・ACTIVATOR™ Drive Mechanismの滅菌にはオートクレーブ(蒸気滅菌)法を推奨します。
- ・AXIUS™ Vacuum 2 Stabilizer / ACROBAT™ SUV Vacuum Stabilizer / ACROBAT™ V Vacuum Stabilizer / ACROBAT™ Stabilizer / XPOSE™ 4 Device は使用が1回の Disposable製品です。再滅菌、再使用は絶対にしないでください。

【禁忌・禁止】

- ・XPOSE™ Device / AXIUS™ Vacuum 2 Stabilizer / ACROBAT™ SUV Vacuum Stabilizer / ACROBAT™ V Vacuum Stabilizer / ACROBAT™ Stabilizerは冠状動脈および新たに梗塞もしくは動脈瘤組織のある部位には使用しないでください。
- ・XPOSE™ Device使用時に血行動態が悪化した場合にはゆっくり心臓を元の位置へ戻してください。

承認番号 21100BZX00101000

販売名：ハートエクスポージャー

製造販売元

VITAL

株式会社バイタル

〒108-0075 東京都港区港南3-8-1
 森永乳業港南ビル8階
 TEL 03-3458-1261 FAX 03-3458-1263
 URL: <http://www.vital-j.co.jp>

製造元

MAQUET